

# Handleiding Doorn Medical Products Basic set



Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn


Inhoud van dit pakket:

- Elektrische pomp
- Cilinder
- 2 verschillende maatringen
- 4 drukringen 10/12,5/15 en 20mm
- Etui
- Micro USB kabel
- Conus
- Gel

## 1. Het klaarmaken van de set.

Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op met de bijgeleverde laadkabel, de laadtijd bedraagt 2 uur.

Voordat u de pomp op uw penis plaatst, raden wij u aan om eerst te oefenen op uw hand. U smeert de maatring in met wat gel en plaatst de cilinder op uw hand en drukt op de “ + ” knop die op de elektrische pomp zit. U zult dan de druk voelen van het vacuüm pompen. Indien dit niet gebeurt, kunt u uw hand rond bewegen om de pomp beter vast te zetten. Om het vacuüm los te laten, drukt u op de “ - ” knop.

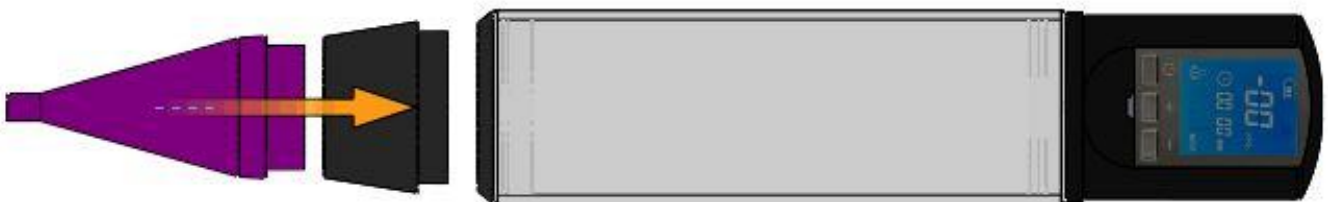

Plaats de kleine conus in de grote conus




Plaats de conus in de cilinder

Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn




smeer de conus in met de bijgeleverde gel, Afhankelijk van de grootte van uw penis kunt u bekijken welke elastische drukring het beste om de stam van uw penis past. U pakt vervolgens de juiste maat drukring en schuift deze om de conus heen. U kunt het beste de drukring met beide handen bevestigen. U bevestigt de elastische drukring vervolgens om de cilinder, zoals in het voorbeeld te zien is. De functie van de elastische drukring zorgt ervoor dat het bloed niet terug stroomt. **Let op: deze mag u maximaal 30 minuten omhouden.**

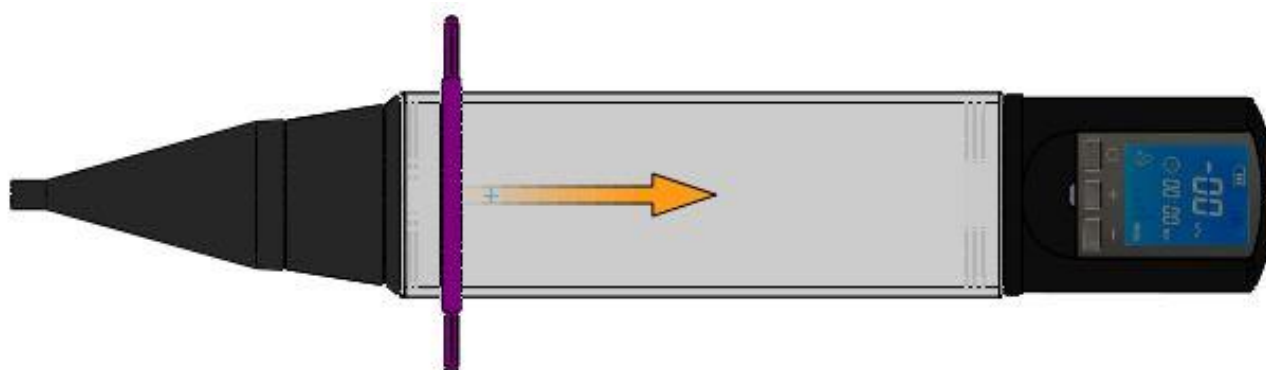

Schuif de druk ring 10 a 15mm over de transparante koker.


Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn

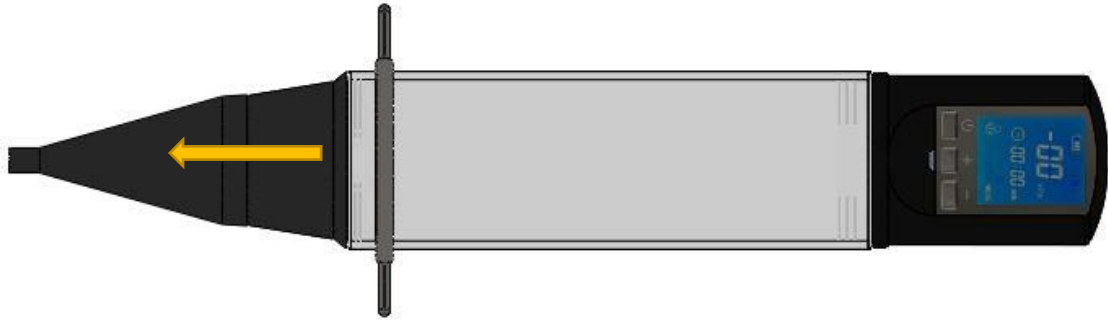

Nadat de drukring om de koker zit kunt u de conus verwijderen.





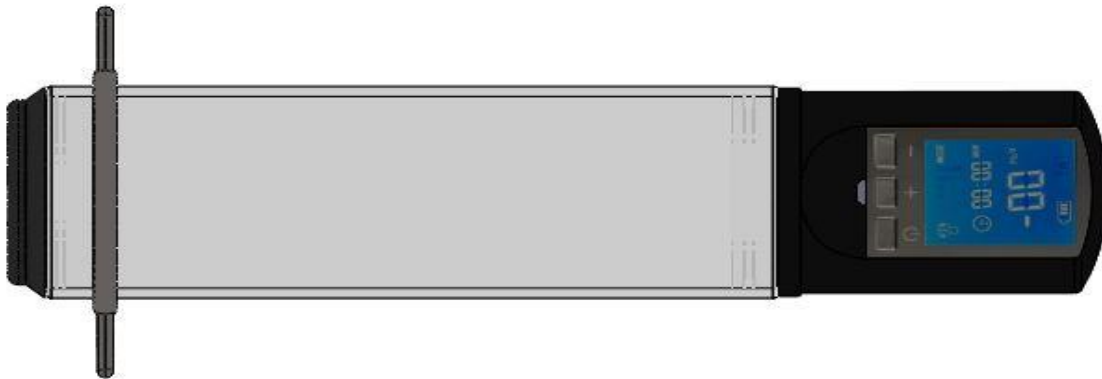


Plaats nu 1 van de 2 maatringen in de koker.



Vervolgens smeert u de maatringen met bijgeleverde gel in en de set is klaar voor gebruik.

Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn

## 1. Gebruik:

Nu de set klaar is voor gebruik kunt u de penis in de koker plaatsen en deze tegen het lichaam aandrukken. Druk hierna op de "⏻" toets nu staat de pomp aan. Door nogmaals op de "⏻" toets te drukken kunt u kiezen tussen  en  stand 1 is tot -50kPa en stand 2 is -30kPa, -40kPa, -45kPa en -50kPa. Doormiddel van de "+" en "-" toets kunt u de vacuüm sterkte instellen deze wordt weergegeven door de indicatie balk   Zodra het  icoon te zien is wil dit zeggen dat de motor in werking is en dat er een vacuüm zal ontstaan. Vooral in het begin raden wij aan om de pomp op stand 2 te gebruiken en deze op het minimale aantal kPa te zetten. Dit omdat de penis de tijd moet krijgen om te vullen met bloed, indien het niet prettig voelt druk u op de "-" toets. Door op de "⏻" toets te drukken stopt de motor ook en kunt u de penis meer tijd geven om vol te lopen met bloed. Dit kunt u desnoeds ook 2 keer per dag oefenen om de bloedtoevoer en zwellichamen te trainen. Doe dit niet 2 keer achter elkaar maar laat hier zeker 4 uur tussen zitten.

## 2. Drukkring Plaatsen:

Is het gewenste resultaat behaald dan kunt u de drukkring voorzichtig van de transparante koker afschuiven, Dit kunt het beste doen door de drukring bij de lussen te pakken en deze naar u toe te trekken tot over de stam van de penis. Vervolgens drukt u op de vacuümpomp op de "-" toets en het vacuüm verdwijnt.

## 3. Drukkring Verwijderen:

Na maximaal 30 minuten **moet** u de drukring verwijderen om beschadigingen aan de penis te voorkomen. Dit doet u door de ring bij de lussen te pakken en deze via de eikel van uw penis af te schuiven. Het kan voorkomen dat er wat urine of sperma uit de penis komt.

## 4. Uitschakelen:

Door de "⏻" toets 2 seconden ingedrukt te houden schakelt de pomp uit, na 1 minuut schakelt de pomp automatisch uit.

Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn

## 5. Onderhoud:

De koker kunt u het beste reinigen met een vochtige doek en de vacuümmotor los genomen van de koker met een droge doek. De conus, matringen en drukringen kunt u met een mengsel van warm water en een druppel dettol reinigen.

## 6. Garantie:

Op de vacuümpomp zit 1 jaar garantie. Zie [www.urecta.com/voorwaarden/](http://www.urecta.com/voorwaarden/)

## 7. Aansprakelijkheid:

Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Urecta en/of Doorn Medical Products heeft/hebben geen medische bevoegdheid, en is/zijn daarnaast niet op de hoogte van, en kan/kunnen ook niet oordelen over de gezondheid of lichamelijke toestand van de wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van het product wordt de wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een medisch specialist op dit gebied.

<b>Product eigenschappen:</b>	<b>Elektrische vacuümpomp</b>
Productnaam	DMP Basic 2020
Gewicht	300 Gram
Kleur	Grijs/Zwart
Scherm	LCD-scherm
Vacuüm tijd	15-40 seconden
Motor	Stille, hoge kwaliteit motor
Druk	-30kPa,-40kPa,- 45kPa,-50kPa
Afmetingen	225x70mm
Aantal keer te gebruiken bij volle accu	40 keer of 1 maand
Laad tijd	2 uur
Lader aansluiting	Micro-USB
Materiaal koker	Acrylaat
Materiaal Maatring	ABS
Batterij	Lithium 600Mah
Materiaal o-ring	Nitrile

Rev.	Datum:	Gecontroleerd door:
06	24-12-2023	Erwin Doorn