

# Werking Urecta Erectiepomp

## Product eigenschappen

Productnaam	Urecta Set Premium
Gewicht	300 Gram
Kleur	Wit/Zwart
Scherm	LCD-scherm
Vacuüm tijd	15-40 seconden
Motor	Stille, hoge kwaliteit motor
Druk	-30kPa, 40kPa, 45kPa, 50kPa
Afmetingen	225x70mm
Aantal keer te gebruiken bij volle accu	40 keer of 1 maand
Laad tijd	2 uur
Lader aansluiting	Micro-USB
Materiaal koker	PVC
Materiaal manchet	Rubber
Batterij	Lithium 600Mah
Materiaal o-ring	Nitrile



Stil



Lithium Batterij



Veiligheidsklasse



Power



Micro-USB



GreenGuard  
certificaat

## Contactgegevens

### E-mail

info@urecta.com

### Website

www.urecta.com

### Telefoon

+31 (0) 6 22 55 22 52



“Na een prostaatoperatie (prostaatkanker) hebben we eerst alle aandacht gegeven aan het herstel en daarna erectiepillen geprobeerd. Wat erg opviel was dat de nare bijwerkingen wel “werkten”, maar voor het overige een onbevredigend resultaat. Via internet kwamen we op de site van Urecta. Na een uitgebreide uitleg besloten we om de Urecta erectiepomp te kopen. Die is inmiddels 5 maanden in gebruik en vanaf het begin succesvol. Wij (mijn vrouw en ik) zijn bijzonder blij met het mooie resultaat! Ons seksleven is weer als vanouds. ”

**J.E. te R.**

# URECTA

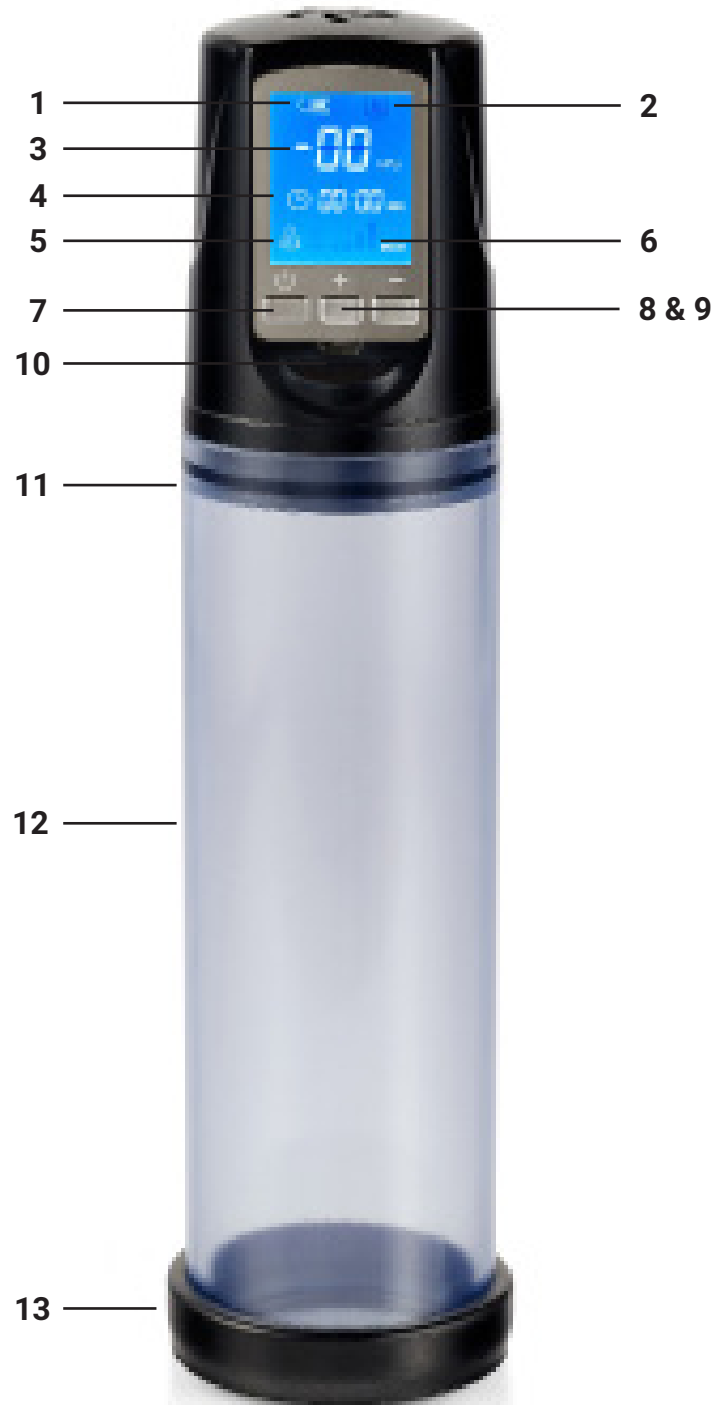
## Handleiding Urecta Set Premium

## Display

1. Batterij percentage
2. Werk signaal
3. Vacuümdruk (kPa)
4. Tijd opbouwen vacuüm
5. Huidige stand
  - Automatisch (1)
  - Handmatig (2)
6. Indicatie aantal (kPa)
7. Aan/Uit/Stand schakelaar
8. "+" toets
9. "-" toets (en ontluuchting)
10. Micro-USB aansluiting

## Cilinder

11. O-Ring
12. Vacuümkoker
13. Manchet


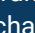





## Uitleg: Stap voor stap

### 1. Batterij laden

Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op met de bijgeleverde laadkabel. De laadtijd bedraagt circa 2 uur.


### 2. Gebruik

Smeer het rubber en de klemring in met een kleine hoeveelheid K-Y gel. Plaats de koker over de penis en druk deze tegen de bijgeleverde klemring aan. Druk hierna op de  toets; nu staat de pomp aan. Door nogmaals op deze toets te drukken kunt u kiezen tussen de stand  en . Bij aanschaf adviseren we allereerst stand 2 aan te houden. Stand 1 gaat automatisch tot -60kPa. Stand 2 heeft verschillende niveaus: -30kPa, -40kPa, -45kPa en -50kPa. Doormiddel van de "+" en "-" toets kunt u het vacuüm instellen. Deze wordt weergegeven door de indicatie balk . Zodra het  icoon te zien is wil dit zeggen dat de motor in werking is en dat er een vacuüm zal ontstaan.

### 3. Klemring

Is het gewenste resultaat behaald dan kunt u de klemring op druk brengen met het bijgeleverde minipompje. Om de klemring te ontkoppelen, dient u de koppeling op de klemring naar achteren te drukken. Vervolgens drukt u de "-" toets op de vacuümpomp in, waarna het vacuüm verdwijnt.

### 4. Uitschakelen

Door de  toets 2 seconden ingedrukt te houden schakelt de pomp uit. Na 1 minuut schakelt de pomp zichzelf automatisch uit.

### 5. Onderhoud

De koker kunt u het beste reinigen met een vochtige doek en de vacuümmotor met een droge doek (zie instructievideo op de website).

### 6. Garantie

Op de Urecta set Premium zit 1 jaar technische garantie. Indien vochtschade komt de garantie te vervallen.